

AutoSense Voice verensokerimittari Pika-Ohje

1.



Pese kätesi

2.



Aseta uusi testiliuska

3.



Tarkista että koodi on oikein

4.



Tee reikä sormeen pistolaitteella

5.



Lisää verinäyte

6.



Tarkasta tulos

7.



Merkitse tulos haluamallasi tavalla

8.



Poista testiliuska

Helppo, tarkka ja nopea mittari verensokerin seuraamiseen

77 Elektronika Kft.
Fehérvári út 98.
H-1116 Budapest
Hungary
www.e77.hu