


EasyFollow-sovellus

Pikaopas (mmol/l)

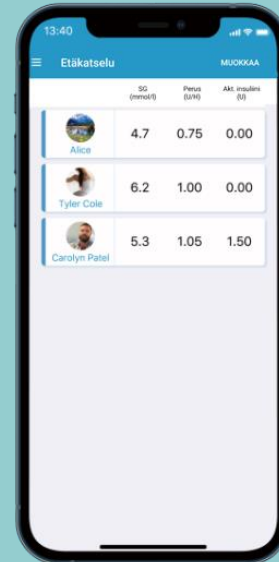

The image shows a smartphone screen displaying the EasyFollow app. The app interface includes a header with 'Etäkatselu' and 'MUOKKAA', a table with patient data, and a 'Pikaopas' button. The table lists three patients: Alice, Tyler Cole, and Carolyn Patel, with their respective SG, Pikaopas, and AKI-insulin values.

	SG (mmol/l)	Pikaopas (mmol/l)	AKI-insuliini (U)
Alice	4.7	0.75	0.00
Tyler Cole	6.2	1.00	0.00
Carolyn Patel	5.3	1.05	1.50

www.elcosmedical.com/medtrum


Simplifying Diabetes

Medtrum

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
Rekisteröinti ja sisäänkirjautuminen	2
Älypuhelimien asetukset	3
EasyFollow-asetukset	4
Aloita etäseuranta	5
CGM-järjestelmän seuranta	7
Insuliinipumpun seuranta	8
Hälytykset	9

EasyFollow-sovellus

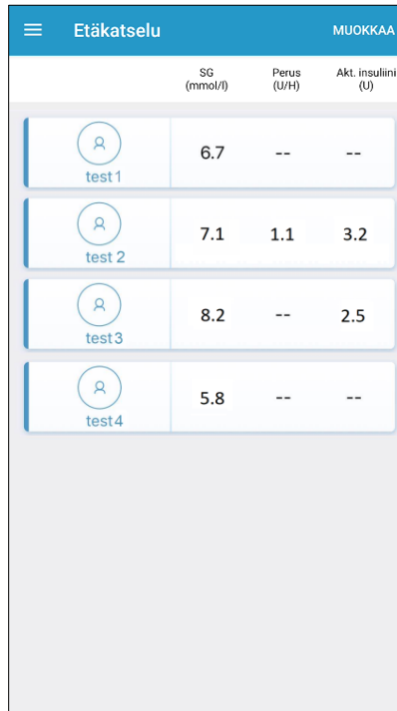

The screenshot shows the 'Etäkatselu' (View) screen of the EasyFollow app. It features a blue header with a menu icon, the title 'Etäkatselu', and a 'MUOKKAA' (Edit) button. Below the header is a table with four columns: a person icon, 'SG (mmol/l)', 'Perus (U/H)', and 'Akt. insulini (U)'. The table contains four rows of test data labeled 'test 1' through 'test 4'.

	SG (mmol/l)	Perus (U/H)	Akt. insulini (U)
test 1	6.7	--	--
test 2	7.1	1.1	3.2
test 3	8.2	--	2.5
test 4	5.8	--	--

Medtrum EasyFollow –mobiilisovelluksen avulla Medtrum-järjestelmän käyttäjän läheiset voivat seurata etänä reaaliaikaista pumppu- tai CGM-tietoja.

Potilas saa viestin, jossa kysytään, sallitaanko hakijan etävalvonta laitteen tietoihin. Jos potilas valitsee **Salli**, läheinen voi tarkastella TouchCare® -järjestelmän tietoja reaaliaikaisena EasyFollow-sovelluksella, jos potilaalla on asennettuna älylaitteessa EasyPatch-/ EasyTouch-sovellus.


Rekisteröityminen ja kirjautuminen

1. Asenna sovellus

- **IOS** – Lataa EasyFollow-sovellus Apple App Storesta.
- **Android** – Lataa EasyFollow-sovellus Google Play-kaupasta

2. Rekisteröidy

- Valitse oikeassa yläkulmassa olevasta lipun kuvasta maaksi/alueeksi suomi.
- Napauta **Rekisteröi**
- Syötä sähköpostiosoitteesi
- Napauta **Tilaa koodi**. Etsi sähköpostiisi lähetetty vahvistuskoodi
- Syötä vahvistuskoodi, nimesi ja salasanasi
- Kun olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojakäytännön ja käyttöehdot, ruksaa pienet ruudut ja napauta "Luo tili" rekisteröidäksesi Medtrum-tilisi.

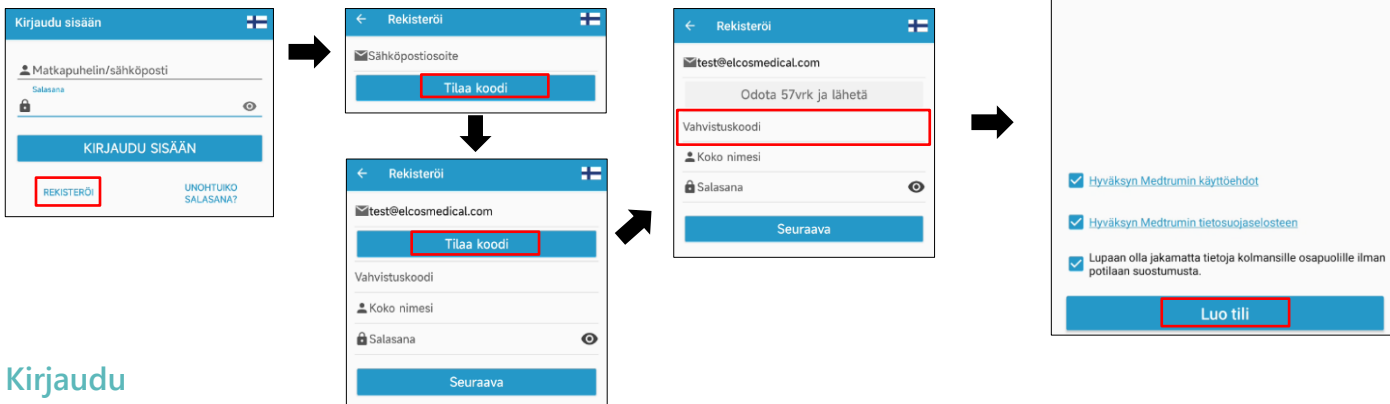

3. Kirjautu

Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kansallislippua. Valitse maa, jonka valitsit rekisteröityessäsi, ja kirjautu sitten sisään sähköpostiosoitteella ja salasanallasi.

Suosittelut älylaitteen asetukset

Katso älylaitteesi ohjeista, kuinka voit muokata laitteesi asetuksia.

Jos olet asentanut sovelluksen iOS-laitteeseen:

- Varmista, että sovellukselle on annettu lupa käyttää WLAN- ja mobiilidataa.
- Varmista, että Äänetön-tila ja Älä häiritse -tila ovat pois päältä.
- Varmista, että ilmoitukset Medtrum EasyFollow -mobiilisovellukselle ovat käytössä.
- Varmista, että Medtrum EasyFollow -mobiilisovellus on aina avoinna ja käynnissä taustalla.
- Käynnistä Medtrum EasyFollow -mobiilisovellus uudelleen, kun älylaite on käynnistetty uudelleen.

Jos olet asentanut sovelluksen Android-laitteeseen:

- Varmista, että älylaite on aina yhdistetty internetiin.
- Varmista, että sovellukselle on annettu lupa käyttää WLAN- ja mobiilidataa.
- Varmista, että Äänetön-tila ja Älä häiritse -tila ovat pois päältä.
- Varmista, että älylaitteesi äänenvoimakkuus on tarpeeksi korkea, jotta voit kuulla hälytykset ja muistutukset.
- Varmista, että sallit Medtrum EasyFollow -mobiilisovelluksen lähettää ilmoituksia, kun käytät muita sovelluksia.
- Varmista, että sallit Medtrum EasyFollow -mobiilisovelluksen pääsyn valokuviiin, mediaan ja tiedostoihin laitteellasi, jotta voit valita valokuvan profiilikuvaksesi sovelluksessa.
- Varmista, että Medtrum EasyFollow -mobiilisovellus on avoinna ja käynnissä taustalla.
- Käynnistä Medtrum EasyFollow -mobiilisovellus uudelleen, kun älylaite on käynnistetty uudelleen.

EasyFollow-asetukset

1. Aseta ääniasetukset

Päävalikko → Asetukset → Yleisasetukset → Ääniasetukset


Suosittelemme kytkemään äänet ja värinä päälle. Muutoin hälytykset voivat jäädä huomaamatta





2. Aseta yksikköasetukset

Päävalikko → Asetukset → Yleisasetukset → Yksikön asetukset

Glukoosiyksikön asetusta ei voi muuttaa.

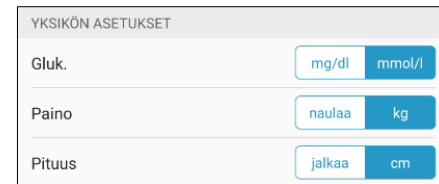


3. Lisää seurattava henkilö

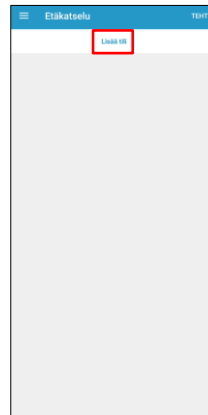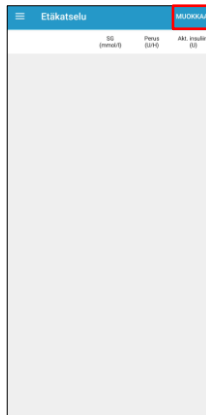

1. Napauta **Muokkaa**
2. Napauta **Lisää tili**
3. Syötä potilaan sähköpostiosoite ja napauta **Ota etäkatselu käyttöön**


1. Etäkatsela EasyTouch-sovelluksen tietoja

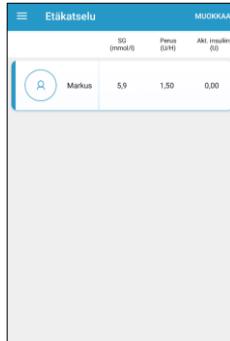

Voit seurata PDM-laitetta ja siihen liittyvää EasyTouch-sovellusta käyttävään potilaan reaaliaikaisia tietoja napauttamalla henkilön tiliä EasyFollow-sovelluksen etäkatselun päävalikosta.



2. Etäkatsela EasySense-sovelluksen tietoja

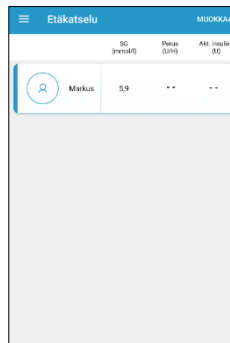


Voit seurata EasySense-sovellusta (Pelkkä CGM-sensori) käyttävään potilaan reaaliaikaisia tietoja napauttamalla henkilön tiliä EasyFollow-sovelluksen etäkatselun päävalikosta.



Aloita etäkatselu

3. Etäkatsele EasyTouch-sovelluksen tilää

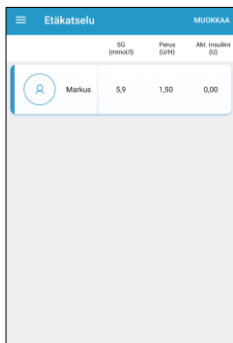


Napauta EasyPatch-sovellusta käyttävää henkilöä Etäkatselun päävalikossa.




4. Seurattavan henkilön asetukset



Paina symbolia

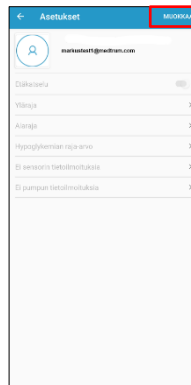

Paina MUOKKAA

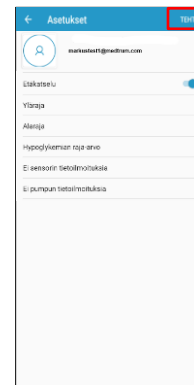


Tallenna asetukset napauttamalla TEHTY



Huom: Asetuksien muuttaminen EasyFollow-sovelluksessa ei muuta seurattavan henkilön asetuksia EasyTouch- / EasySense- / EasyPatch-sovelluksissa

CGM-järjestelmän seuranta

Sensorin glukoosiarvokuvaajan saat näkyviin painamalla Etäkatseluvalikosta **CGM-järjestelmä**. Kuvaaja näyttää glukoosin arvon. Glukoosin arvo 3,1 mmol/l näkyy kuvaajassa punaisena viivana

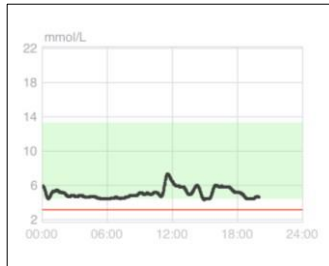

Jos haluat nähdä glukoosiarvo kuvaajan suurempana, käännä älylaite vaakasuoraan.

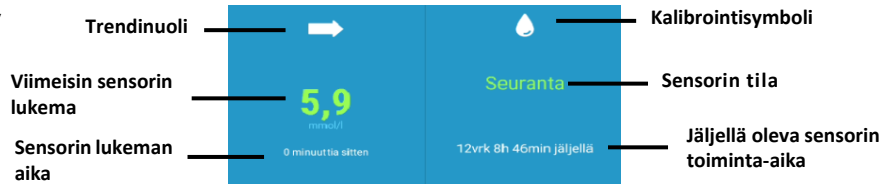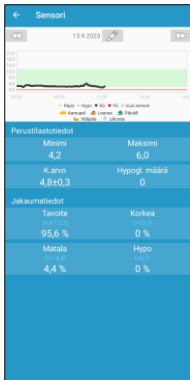


Sensorin tila:


- **Ei kalibroitu** : Sensoria ei ole kalibroitu lämpiämisen jälkeen (jos ei ole käytetty tehdaskalibrointia)
- **Seuranta** : Sensori ja lähetin toimivat ja lähetin välittää sensorin sokeriarvot sovellukseen
- **Tarvitaan kalibrointi** : Viimeisin kalibraatio on vanhentunut ja uusi kalibrointi tarvitaan.
- **Kalibrointivirhe** : Viimeisin kalibrointi epäonnistunut.
- **Hävinnyt**: Sovellus ei löydä sensorin signaalia.
- **Sensori vanhentunut** : Sensorin toiminta-aika on päättynyt.
- **Ei lukemia** : Sensorista ei saada arvoja.
- **Sensorivirhe** : Nykyisessä sensorissa virhe.
- **Lähettimen virhe** : Lähetin ei toimi oikein.
- **Yhdistetään** : Lähetintä yhdistetään sensoriin.

Insuliinipumpun seuranta


Insuliinin annon kuvaaja näyttää kuluvan vuorokauden perusinsuliinin ja bolusten annostuksen. Perusinsuliiniannos näkyy vihreänä viivana ja bolus annokset sinisinä palkkeina.

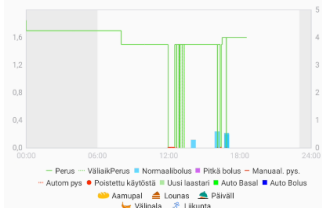

Jos haluat nähdä glukoosiarvo kuvaajan suurempana, käännä älylaite vaakasuoraan.

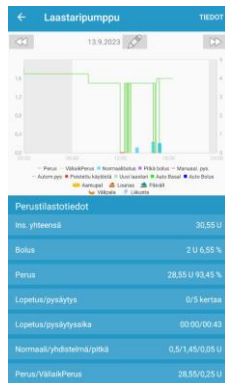

Tämän hetkinen perusinsuliinin antonopeus ja vuorokauden perusinsuliinin kokonaisannos

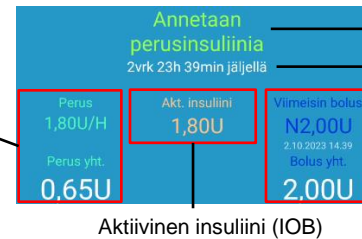

Pumpun tila
Säiliölaastarin jäljellä oleva toiminta-aika
Viimeisin bolusannos, antoaika ja vuorokauden kokonaisbolus

Reaaliaikainen pumpun tila:


- **Annetaan perusinsuliinia:** Perusinsuliinia annostellaan.
- **Annetaan normaalibolusta:** Pumppu antaa normaalibolusta.
- **Annetaan pitkää bolusta:** Pumppu antaa pitkää bolusta.
- **Keskeytetty:** Insuliinin anto pysäytetty.
- **Pumppuun ei saada yhteyttä:** Sovellus ei löydä pumpun signaalia.
- **Tukkeuma havaittu:** Pumpussa tukkeuma.
- **Tyhjä säiliö:** Säiliölaastarin insuliini loppunut
- **Laastari vanha:** Säiliölaastarin toiminta-aika loppunut.
- **Laastarivirhe:** Säiliölaastarissa häiriö, ei toimi oikein.
- **Säiliölaastarin paristo loppu:** Säiliölaastarin paristo loppunut.
- **Pumppuvirhe** Pumpun perusosassa häiriö, ei toimi oikein.
- **Yli vrk:n maksimi:** Vuorokauden maksimi insuliiniannos saavutettu.
- **Yli tunnin maksimi:** Tunnin maksimi insuliiniannos ylitetty.

Hälytykset:


Alerts are triggered by conditions that may require your attention. Do not ignore any Alerts.

Tyhjennä hälytykset

- Lue hälytys sovelluksesta
- Napauta **OK** kuitataksesi hälytyksen
- Seuraa hälytyksen ohjeita

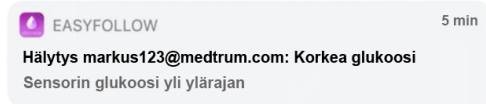

Sovellus käynnissä taustalla

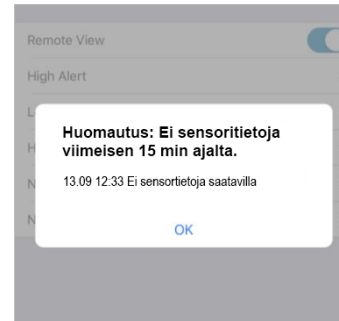

Sovellus käynnissä etualalla

Esimerkkihälytyksiä

Sovelluksen hälytys	Tarvittava toimenpide
Korkea glukoosi	Tarkasta verensokeri ja hoida tarpeen mukaan. Jatka verensokerin tarkkailua.
Matala glukoosi	Tarkasta verensokeri ja hoida tarpeen mukaan. Jatka verensokerin tarkkailua.
Alle 3,1 mmol/l	Tarkasta verensokeri ja hoida tarpeen mukaan. Jatka verensokerin tarkkailua.
Ei sensorin dataa	Tarkasta sensorin tila
Ei pumpun dataa	Tarkasta pumpun tila



Medtrum Technologies Inc.
Building 3 and Building 8, No. 200, Niudun Road
Shanghai 201203, China
Tel: +86-21-50274781
Fax: +86-21-50274779



Medtrum B.V.
Nijverheidsweg 17
5683 CJ Best
The Netherlands
Tel: +31 (0) 499745037



Tämä tuote on direktiivin 93/42/ETY
(MDD) ja direktiivin 2014/53/EU
(RED)vaatimusten mukainen.

MD-TL-008
IM889008WW
348481
Versio: 1.0

Simplifying Diabetes

Medtrum