


EasyPatch-sovellus

Insuliinipumppujärjestelmä

Pikaopas (mmol/l)

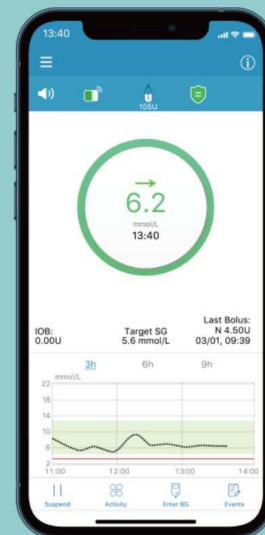


Simplifying Diabetes

Medtrum

Sisällys

EasyPatch yleiskatsaus	1
Älylaitteiden asetukset	3
Asenna ja kirjaudu sisään	4
Rekisteröi Medtrum-tili	5
Näyttöruutu ja päävalikko	6
Insuliinipumpun asetukset	7
Aloita uusi korjaustiedosto	10
Väliaikainen perus	14
Manuaalinen bolus	15
Boluslaskin	16
Keskeytä ja jatka	17
Poista Patch käytöstä	18
Pumpun tiedot	19
Hälytykset ja hätäpakkaus	20
Tilastot	21
Tapahtumat	22
Muistutukset	23
Omat asetukset	25

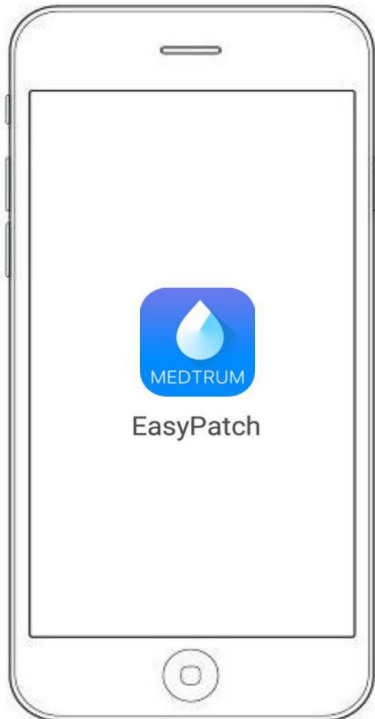

EasyPatch-insuliinipumppujärjestelmä koostuu:

- Älylaite, johon on asennettu Medtrum EasyPatch -mobiilisovellus.
- Medtrum insuliinipumppu (Patch Pump)

Medtrum EasyPatch -mobiilisovellus tarkkailee ja ohjaa Pumppua Bluetoothin kautta. Se tarjoaa sinulle Pumpun tiedot viimeisten 90 päivän ajalta.


Bluetooth-yhteys on välttämätön EasyPatch-sovellukselle Pumpun ohjaamiseen/valvontaan. Sovellus voi havaita yhteyden katkeamisen ja ilmoittaa siitä.

Jos yhteys katkeaa, Pumppu jatkaa perusinsuliinin antamista ohjelmoitujen asetustesi perusteella, suorittaa turvallisuustarkistuksia ja keskeyttää annostelun automaattisesti vakavissa olosuhteissa.

Sovellusta voi käyttää, kun älylaitteesi on ladattu ja päällä. Jos puhelin on sammutettu, sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden Patch Pump -järjestelmään heti, kun käynnistät älylaitteen ja sovelluksen uudelleen.

Insuliinipumppujärjestelmä

**Insuliinisäiliö
eli säiliölaastari**

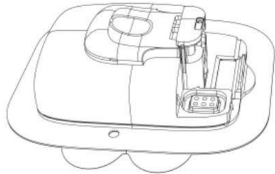

**Pumpun perusosa
eli pumppu**



- Ultraohut Pumppu koostuu uudelleenkäytettävästä pumpun perusosasta (MD8201) ja kertakäyttöisestä säiliölaastarista (MD8200), johon mahtuu 200 U insuliinia ja kestää jopa 3 päivää.
- Pump Base (pumpun perusosa) tallentaa toimitusasetukset ja lähettää tiedot EasyPatch-sovellukseen Bluetooth LE -yhteyden kautta (esteetön viestintäetäisyys 4 metriä).
- Patch Pump (pumpun perusosa ja säiliölaastari yhdistetty) on vesitiivis 2,5 metrin syvyydessä 60 minuuttia (IP28).
- Säilytä Pumppu ja Säiliölaastari -10°C (14°F) - 55°C (131°F) lämpötiloissa.
- Insuliinipumppujärjestelmän käyttölämpötila on 5 °C (41 °F) ja 40 °C (104 °F) välillä.

Älylaitevaatimukset • IOS-laite: IOS 9.3.5

-järjestelmä tai uudempi • Android-laite: Android 8.0

-järjestelmä tai uudempi

Suosittelut älylaitteen asetukset Katso älylaitteesi ohjeista, miten voit muuttaa sen asetuksia.

Aseta seuraavat asetukset EasyPatch-sovelluksellesi:

- Bluetooth: Käytettävissä ja päällä
- Äänetön ja Älä häiritse: Pois päältä
- Äänenvoimakkuus: tarpeeksi voimakas, jotta kuulet hälytyksiä ja muistutuksia.
- Internet: Varmista, että älylaitteesi asetukset sallivat EasyPatch-sovelluksen käyttää WLAN- ja mobiilidataa.
- Kamera: Salli EasyPatch-pääsy kameraan.
- Ilmoitukset: Ota EasyPatchin ilmoitukset käyttöön
- Aika: Älä muuta älylaitteidesi aikaa manuaalisesti, koska sovelluksesi näytön aika on silloin eri ajassa.
- Akun säästötila: Älä aktivoi virransäästön käyttötilaa. Muussa tapauksessa sovellus lopettaa tietojen lataamisen taustalla.
- Pidä EasyPatch-sovellus auki ja käynnissä taustalla
- Käynnistä EasyPatch App uudelleen älylaitteesi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Jos asensit sovelluksen IOS-laitteeseen:

- Varmista, että EasyPatchin päivitys taustalla on päällä.


Jos asensit sovelluksen Android-laitteeseen:

- Varmista, että annat sovellukselle luvan käyttää laitteen sijaintia, jotta sovellus voi käyttää Bluetooth-ominaisuutta.
- Varmista, että EasyPatch-sovellus on lukittu taustalle.
- Avaa automaattinen käynnistys (autorun) älykkäässä hallinnassa (Samsung).

Asenna ja kirjaudu

1. Lataa ja asenna EasyPatch App

Hae "Medtrum" AppStoresta tai GooglePlaysta

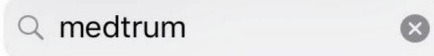

DEVELOPER


Medtrum



2. Avaa Medtrum EasyPatch -sovellus

3. Kirjaudu sisään Medtrum-tilille

Jos sinulla on jo Medtrum-tili, napauta kansallista lippua oikeassa yläkulmassa ja valitse rekisteröinnin yhteydessä valitsemasi maa ja kirjaudu sisään tililläsi ja salasasanallasi.

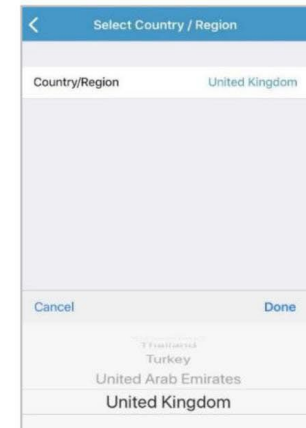

Rekisteröi Medtrum-tili

1. Rekisteröidy sähköpostitse

Jos sinulla ei ole Medtrum-tiliä, napauta **Rekisteröidy** vasemmassa alakulmassa päästäksesi Rekisteröi-näyttöön. Valitse maa napauttamalla **kansallista lippua**.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi tilisi nimeksi. Napauta **Hanki koodi** kerran, niin saat 6-numeroisen vahvistuskoodin. Syötä 6-numeroinen vahvistuskoodi.

2. Aseta salasana


- Salasanan tulee sisältää merkkejä kolmesta seuraavista neljästä luokasta:
 - Englannin isot kirjaimet (A–Z)
 - Englannin pienet kirjaimet (a–z)
 - 10 perusnumeroa (0–9)
 - Ei-aakkosmerkit, mukaan lukien ~!@#\$
 - %^&*()_+ = `{|[]\.:';<>.,
- Salasanan tulee olla 6-20 merkkiä pitkä.
- Salasanan tulee olla eri kuin käyttäjätunnuksesi (sähköpostiosoitteesi).
- Salasana ei saa sisältää kolmea peräkkäistä numeroa (esim. 123, 321).
- Salasana ei saa sisältää kolmea peräkkäistä kirjainta (esim.: abc, cba).
- Salasana ei saa sisältää välilyöntejä.

3. Luo tili

Kun olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojakäytäntöön ja ehtoihin käytöstä, rastita pienet ruudut ja napauttamalla **Luo tili** rekisteröidäksesi Medtrum-tilisi.


Näyttöruutu ja päävalikko

Päävalikko

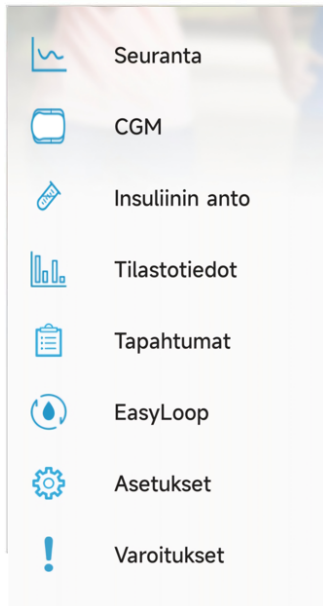


Näyttö

Ei yhteyttä

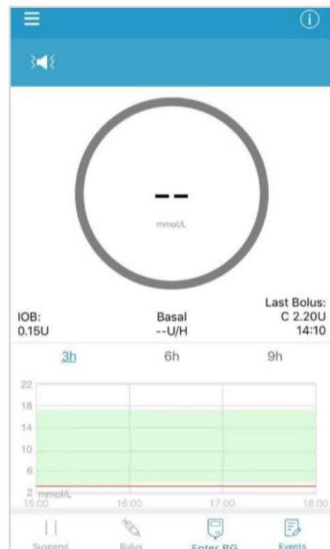

Yhdistetty

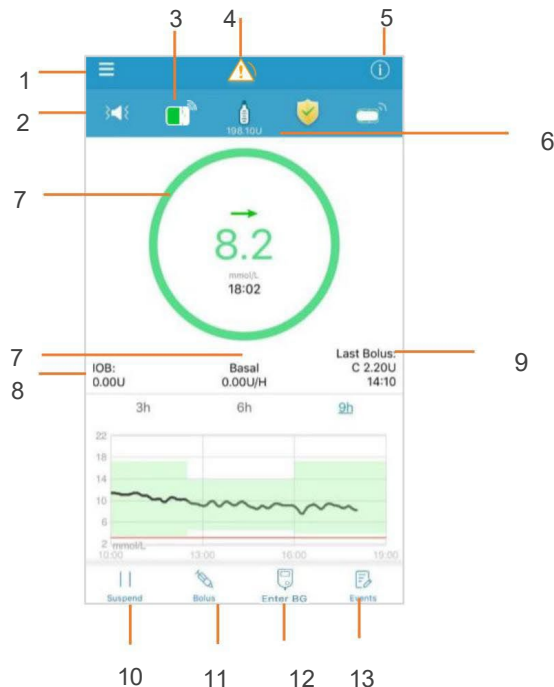

1. Päävalikko

2. Ääniasetukset

3. Pumpun RF-signaali

4. Hälytys/varoitus

5. Tila

6. Insuliinia jäljellä

7. Toimituksen tila

8. IOB

9. Viimeinen bolus

10. Keskeytä/Jatka


11. Anna bolus

12. Syötä VS

13. Lisää tapahtuma


1. Pumpun ääniasetukset

Päävalikko -> Asetukset -> Insuliinipumppu -> Pumpun varoitukset -> Ääniasetukset

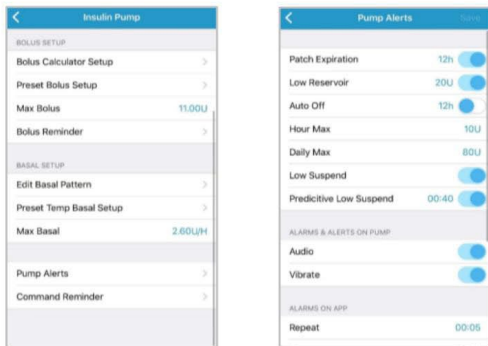

2. Etsi pumpun SN (sarjanumero)


Löydät pumpun SN:n tuotelaatikosta tai pumpun takaa.

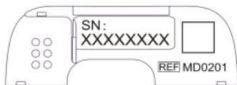


3. Lisää pumpun sarjanumero, SN

Päävalikko -> Insuliinipumppu -> Lisää Pumppu

a. Voit käyttää kameraa skannataksesi QR-koodin Pumpun takaa tai tuotepakkauksesta.

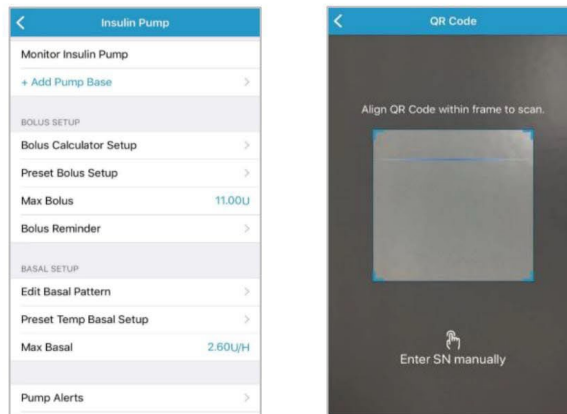

b. Voit myös napauttaa **Syötä SN manuaalisesti** syöttääksesi SN manuaalisesti.

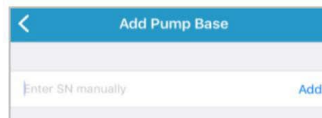

Insuliinipumpun asetukset - Perus

1. Maksimi perusinsuliini

Päävalikko -> Asetukset -> Insuliinipumppu -> Maks. perus

2. Muokkaa peruskuvia

1. Napauta Muokkaa Perus-mallia ja valitse muokattava osio

2. Aseta perusnopeus

- Napauta sinistä U/H-kenttää ja aseta perusnopeus.
- Aseta perusnopeus välille 0 ja maksimi Perusnopeus. Perusnopeus on säädettävissä 0,05 U/H:n välein.

3. Lisää aikasegmentti

- Napauta +Lisää aikasegmentti lisätäksesi uuden segmentin.
- Voit määrittää enintään 48 segmenttiä kullekin päivälle.

4. Poista aikasegmentti

- Liu'uta vasemmalle kussakin segmentissä ja napauta Poista. Seuraavan jakson alkamisaikaa muutetaan

5. Vieritä ylös ja alas nähdäksesi kaikki segmentit

6. Tallenna asetukset napauttamalla Valmis

3. Valitse peruskuvia

Päävalikko ->Asetukset ->Insuliinipumppu->Perus-asetukset ja valitse muokattava malli

Start	24-hr Total: 13.65U Basal(U/H)
00:00	0.50
03:00	0.70
09:00	0.60
19:00	0.40

Standard	22.80U
Exercise	0.00U
Holiday	0.00U
Pattern A	0.00U
Pattern B	22.90U ✓
Pattern C	0.00U
Pattern D	0.00U

1. Maksimi Bolus

Päävalikko -> Asetukset -> Insuliinipumppu -> Bolusasetukset

Max Bolus 22.35U

2. Ota boluslaskin käyttöön

- Kytke Boluslaskin päälle/pois päältä
- Aseta IC-suhteet
- Aseta insuliiniherkkyys
- Aseta VS-tavoite
- Aseta IOB-aika (aktiivisen insuliinin aika)


Bolus Calculator Setup	
Bolus Calculator	<input checked="" type="checkbox"/>
IC Ratios	>
Insulin Sensitivity	>
BG Target	>
IOB Time	3 h

IC Ratios		
Start	Insulin (U)	Carbs (g)
00:00	1	15
16:30	1	13
+ Add Time Segment		

Insulin Sensitivity		
Start	Insulin (U)	BG (mmol/L)
00:00	1	2.8
08:30	1	3.2
+ Add Time Segment		

BG Target		
Start	Low Limit	High Limit (mmol/L)
00:00	3.8	12.4
08:30	4.0	13.8
+ Add Time Segment		

3. Normaali, pidennetty ja yhdistelmäbolus

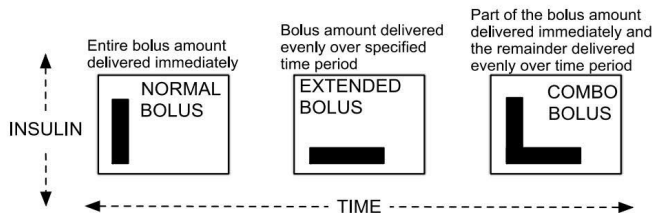

4. Komennon muistutus


Command Reminder	
Command Reminder	<input checked="" type="checkbox"/>
If Command Reminder is ON, you need to double tap the pump to deliver bolus or change basal.	

Aloita uusi laastari

Aloita uusi laastari


Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Uusi laastari

Kun laastaria ei ole aktivoitu tai kun vanha laastari on poistettu, voit aktivoida uuden laastarin siirtymällä **Insuliinin annostelu** -valikkoon. Varmista, että pumpun sarjanumero SN on syötetty sovellukseesi oikein.

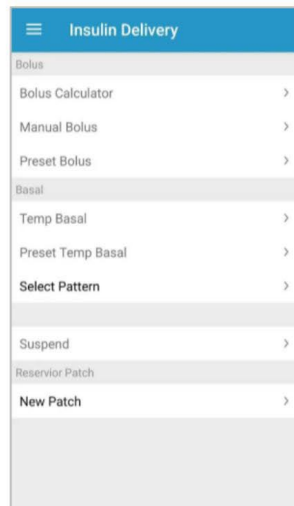

1 Valitse infuusiokohta

- Puhdas, karvaton, kuiva, riittävästi rasvakudosta (vähintään 5 mm) ja ei navan lähellä.
- Uuden infuusiokohdan tulee olla vähintään 2,5 cm:n (1 tuuman) etäisyydellä viimeisestä infuusiokohdasta.
- Jos valitset infuusiokohdan vatsallesi, selkään tai pakaraan, kiinnitä laastari vaakasuoraan.
- Jos valitset infuusiokohdan olkaparresta tai reidestä, kiinnitä laastari pystysuoraan.

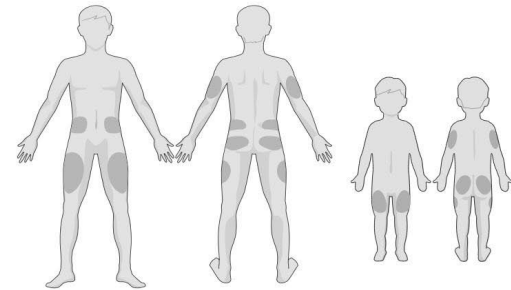

Huomautus: Kiinnitä huomiota laitteen sijaintiin, valitse Sensorin ja Laastaripumpun paikka niin, että siellä on vähän viestintähäiriötä.

2 Valmistele infuusiokohta

- Pese kätesi saippualla ja vedellä.
- Puhdista infuusiokohta alkoholipyyhkeellä tarttuvuuden parantamiseksi.
- Anna ihon kuivua kokonaan.

3 Yhdistä pumpun alusta ja säiliöpaikka

Päävalikko -> Insuliinin anto -> Uusi laastari

Työnnä pumpun alusta varovasti ja paina pohjaan asti, kunnes pumpun alusta lukittuu paikalleen säiliön paikkaan.



Pumppu piippaa 4 kertaa


Aloita uusi laastari

4 Täytä uusi laastarisäiliö

Päätä terveydenhuollon tarjoajan avulla insuliinimäärä (70 U - 200 U), joka sinun on asetettava Insuliinisäiliö-laastariin.

Varoitus: Älä ruiskuta ilmaa säiliön täyttöaukkoon. Tämä voi johtaa tahattomaan tai keskeytyneeseen insuliinin annosteluun.

1. Työnnä ilmaa injektiopulloon.

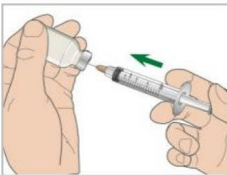

2. Täytä ruisku insuliinilla.




Poista ilma

3. Pidä ruisku pystysuorassa Pumppuun nähden ja neula täyttöaukon sisällä. Vedä mäntä sisään poistaaksesi jäännösilman.



4. Paina mäntää, kunnes näet insuliinipisaran neulan kärjessä

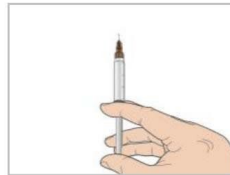


5. Täytä säiliö hitaasti insuliinilla



5 Käynnistä pumpun pohjustus


Paina neulan painiketta turvalukkoon asti

Älä aloita pohjustusta ennen kuin neulan nappia on painettu.

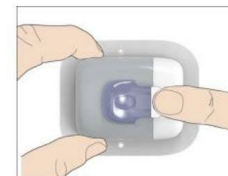




Pohjustus kestää noin 3 minuuttia.

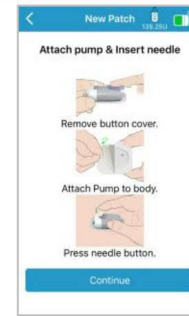


6 Aseta laastari

1. Irrota turvalukko

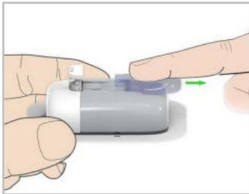


2. Irrota suojakalvot.

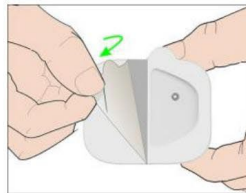


3. Paina pumpppua ihoa vasten



4. Paina sormellasi tarran koko reunan ympäri

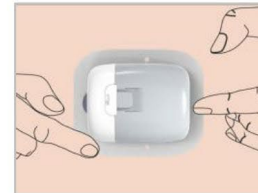

5. Paina neulan painiketta yhdellä nopealla liikkeellä neulan työntämiseksi kokonaan sisään

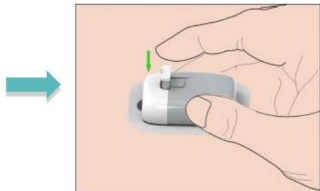

7 Aloita insuliinin antaminen

Napauta **Jatka** neulan painamisen jälkeen



Väliaikainen perus

1. Aktivoi Väliaikainen perusinsuliini

Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Väliaik perus

Väliaik perusinsuliinilla voit säätää perusannostasi lyhyeksi ajaksi.

Valitse perustyyppi, annos tai prosentti ja kesto. Napauta pumpua 2 kertaa, näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että tilapäinen basaali on aktivoitu. Napauta **Takaisin** palataksesi näyttöruutuun.

Temp basal

Rate(U/H) Percent

Value 1.20 U/H

Duration 03:00

Next

Temp basal

Rate(U/H) Percent

Value 120%

Duration 04:00

Next

3. Aseta Esiasetettu väliaik perus

Päävalikko -> Asetukset -> Insuliinipumppu -> Esiasetettu väliaikainen perus

Preset Temp Basal Setup

- Heavy Ex >
- Medium Ex >
- Light Ex >
- Sick >
- Temp 1 >
- Temp 2 >
- Temp 3 >

2. Peruuta tilapäinen perustila

Päävalikko -> Keskeytä

Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Peruuta Väliaik perus

Insulin Delivery

Bolus

- Bolus Calculator >
- Manual Bolus >
- Preset Bolus >

Basal

- Cancel temp basal >
- Preset Temp Basal >
- Select Pattern >

Suspend >

Reservoir Patch

- Deactivate Patch >

4. Aktivoi Esiasetettu väliaik perus

Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Esiasetettu väliaik perus

Preset Temp Basal

- Heavy Ex 0.50U/H >
- Medium Ex 85% >
- Light Ex 0.60U/H >
- Sick 1.00U/H >
- Temp 1 1.10U/H >
- Temp 2 80% >
- Temp 3 85% >

- 1 Päävalikko -> Insuliinin annostelu
-> Manuaalinen bolus

Manual Bolus

Set 0.00 U

Normal Extended Combo

- 2 Aseta bolusannos

Manual Bolus

Set 3.00 U

Normal Extended Combo

BG Reminder 00:30

- 3 Aseta bolustyyppi

Normal Extended Combo

- 4 Peruuta aktiivinen bolus

Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Peruuta bolus

Normaali bolus

Manual Bolus

Are you sure you want to deliver the bolus?
Normal: 3.00U

Slide to deliver

Jatkettu bolus

Aseta kesto

Manual Bolus

Set 3.00 U

Normal Extended Combo

Duration 00:30

Yhdistelmäbolus

Napauta sinistä/violettiä +merkkiä asettaaksesi osuuden Normaali osa ja Laajennettu osa
Aseta kesto

Manual Bolus

Set 3.00 U

Normal Extended Combo

+ [Split Bar] +

Normal 1.40U 46% Extended 1.60U 54%

Duration 00:30

BG Reminder 00:30

NEXT

Boluslaskin

- 1 **Päävalikko →
Insuliinin
toimitus →
Boluslaskin**

- 2 **Syötä VS tai
Hiilihydraatit tai
molemmat**

- 3 **Aseta
bolusannos
ja bolustyyppi**

Normaali bolus

Jatkettu bolus


Yhdistelmäbolus

Keskeytä ja jatka

Keskeytä


Päävalikko -> Insuliinin annostelu -> Keskeytä

Bolus annetaan


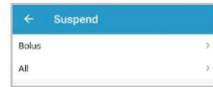


Bolus

Kaikki

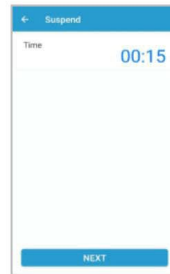

Bolusta ei anneta

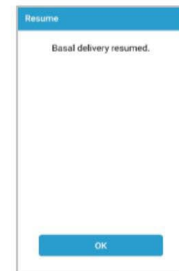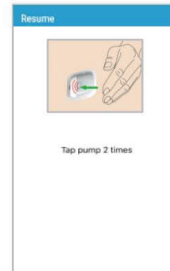



Jatka

Päävalikko -> Insuliinin toimitus -> Jatka



Poista laastari käytöstä

Valikko -> Insuliinin annostelu -> Poista laastari käytöstä

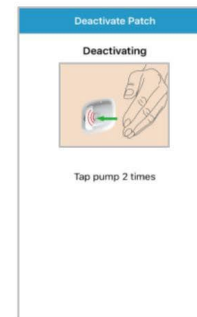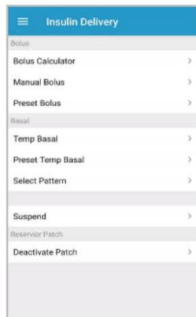

Poista laastari

- Kun Reservoir Patch (laastari) on poistettu käytöstä, saat neulan pois ihosta neulanpoistotyökälulla (Reservoir Patch pakkauksessa).
- Poista varovasti koko Patch Pump. Käytä tarvittaessa lääketieteellistä liimanpoistoainetta tai vauvaöljyä.
- Taita ja katkaise Reservoir Patchin kieleke. Työnnä pumpun alustaa alhaalta ylös ja irrota se vanhasta säiliöpaikasta.
- Hävitä vanha Reservoir Patch paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. **ÄLÄ hävitä pumppuosaa.** Se on uudelleenkäytettävä.



Varoitus: Kun laastari on poistettu iholta, älä yritä painaa neulanpainiketta uudelleen. Tämä johtaa loukkaantumiseen.

Näytön näkymä


Basaalin toimittaminen



Jatketun boluksen antaminen



Toimitus keskeytetty

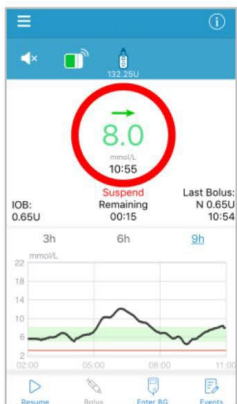

Normaalin boluksen antaminen



Toimituksen tila

Kuvake	Muoto ja väri	Kuvaus
	Harmaa rengas	Harmaa rengas osoittaa, että pumpua ei ole aktivoitu.
	Vihreä rengas	Vihreä rengas edustaa basaalin toimitusta.
	Vihreä ja tummanvihreä rengas	Vihreä rengas tummanvihreällä osalla edustaa Väliaikaisen basaalin tilaa, tummanvihreä osa osoittaa Väliaikaisen basaalin toimituksen edistymistä.
	Sininen ja tummansininen rengas	Sininen rengas edustaa normaalia bolusta, tummansininen osa ilmaisee toimituksen edistymistä.
	Violetti ja tummanvioletti rengas	Violetti rengas edustaa pidennettyä bolusta, syvän violetti osa osoittaa toimituksen edistymistä.
	Punainen rengas	Punainen rengas edustaa toimituksen keskeytystilaa.

Hälytykset ja hätäpakkaus

Varoitukset



Sovellusviesti	Suoritettavat toimet
KESKEYTYKS PÄÄTTYNYT	Tarkista VS. Jatka perusinsuliinin antoa tarvittaessa.
SÄILIÖ VÄHISSÄ	Vaihda laastarisäiliö pian.
SÄILIÖ VANH 1 tunnin kuluttua	Vaihda laastarisäiliö pian
SÄILIÖN AKKU VÄHISSÄ	Vaihda laastarisäiliö pian.

Hälytys (keskitason prioriteetti)



Sovellusviesti	Suoritettavat toimet
SÄILIÖ VANHENTUNUT	Vaihda laastarisäiliö.. Tarkista verensokeri.
TYHJÄ SÄILIÖ	Vaihda laastarisäiliö. Tarkista verensokeri.
YLITTÄÄ VRK:N MAKSIMIN	Vaihda laastarisäiliö. Tarkista verensokeri. Tarkista historia.
PUMPPU KANTAMAN ULKOP.	Siirrä älylaitte Pumpun lähelle. Jos pumpun signaalin palauttaminen epäonnistui, vaihda laastarisäiliö.
PUMPPU KÄYNNISTETTY UUELLEEN	Laastari vaihdettu? Jos tarvitset apua, soita asiakastukeen.

Hälytys (korkea prioriteetti)



Sovellusviesti	Suoritettavat toimet
TUKOS HAVAITTU	Vaihda laastarisäiliö. Tarkista verensokeri.
LAASTARIVIRHE	Vaihda laastarisäiliö. Tarkista verensokeri.
PUMPUN VIRHE	Poista pumppu. Ota yhteyttä asiakastukeen Tarkista verensokeri.


Ensiapupakkaus

Pidä hätäpakkaus aina mukanasasi varmistaaksesi, että sinulla on tarvittavat tarvikkeet. Ilmoita perheenjäsenelle, työtoverille ja/tai ystävälle, missä tätä hätäpakkausta säilytetään.

Hätäpakkauksen tulee sisältää, mutta ei rajoittuen:

- Nopeavaikutteiset glukoositabletit tai –geeli
- VS-valvontatarvikkeet
- Virtsan ketoaineiden testatarvikkeet
- Insuliiniriski
- Nopeavaikutteinen U-100 insuliini
- Extra Medtrum 2,0 ml insuliinisäiliöitä, patch
- Varavirtalähde
- Terveystuotteen tarjoajan ohjeet siitä, kuinka paljon insuliinia pistetään, jos pumpun annostelu keskeytyy
- Alkoholipyyhkeitä
- Hätäpakkaus Glukagonia
- Hätänumerot
- Jos matkustat, kopio terveydenhuollon kirjeestä lentoyhtiöiden turvapalvelujen tarjoaja

Voit tarkastella pumpun tietoja joko napauttamalla 📅 ja valitsemalla päivän tai napauttamalla < / > siirtyäsi taaksepäin/eteenpäin.

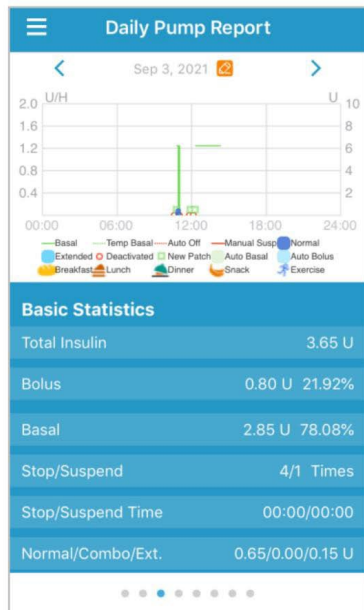

Päivittäinen pumpuraportti

Daily Delivery Details
Sep 3, 2021

Basal	Bolus	Total
12:17	1.25 U/H	
12:16	New Patch	
12:08	Patch discarded	
11:55	New Patch	
11:49	Stop	
11:01	Stop	

Päivittaiset toimitustiedot




Event Summary
7 D 30 D 90 D
Aug 18, 2021 - Aug 24, 2021


Date	BG Test #/Mean (mmol/L)	Carbs #/Total (g)	Insulin Injection (U)	Exercise #/Duration
08/18	--/--	--/--	--	--/--
08/19	--/--	--/--	--	--/--
08/20	--/--	--/--	--	--/--
08/21	--/--	--/--	--	--/--
08/22	--/--	--/--	--	--/--
08/23	--/--	--/--	--	--/--
08/24	2/5.7	1/20	--	1/1min
Overall	2/5.7	1/20	--	1/1min

Tapahtuman yhteenveto

Tapahtumat


Päävalikko -> Tapahtumat

Tämä näyttö näyttää kaikki tapahtumat ennen tiettyä päivämäärää, joita voidaan muuttaa napauttamalla  ja valitsemalla päivä tai napauttamalla  /  siirtyäsi taaksepäin/eteenpäin.

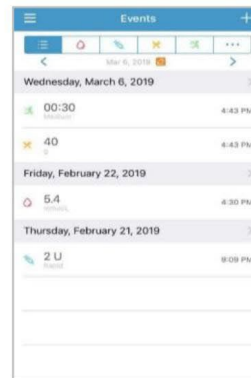


1. Lisää tapahtuma

     lisätäksesi VS:tä, insuliinipistoksia, ruokahiilihydraatteja, harjoittelua tai muita tapahtumia.

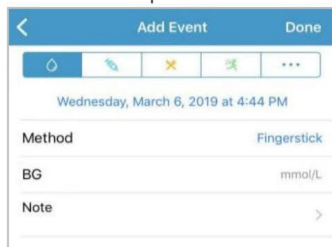

2. Muokkaa tapahtumia

Tallenna tapahtuma napauttamalla **Valmis** tai poista tapahtuma napauttamalla **Poista**.



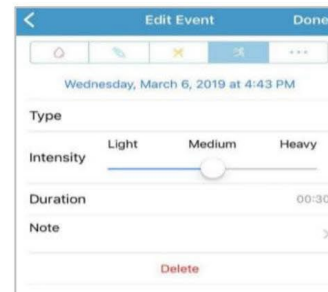


1. Henkilökohtainen muistutus

Henkilökohtaiset muistutukset voivat olla hyödyllisiä muistuttamaan, milloin tarkistaa verensokeri, antaa bolus jne.

Napauta **+** lisätäksesi muistutuksen, pyyhkäise

sitä oikealta vasemmalle ja napauta **Poista** poistaaksesi sen.

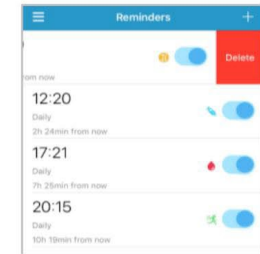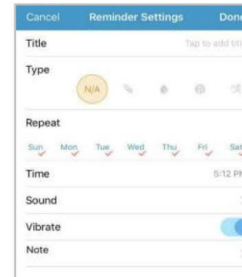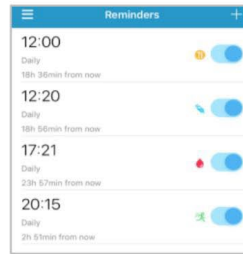

2. Bolusmuistutus

Päävalikko-> Asetukset -> Insuliinipumppu -> Bolusmuistutus

Kun unohdat antaa boluksen aikojen A ja B välillä, saat Muistutuksen ajankohdassa B.




Aloitusaika A

Päätymisaika B

3. Komennon muistutus

Komennon muistutus koskee vain insuliinipumppua. Kun komentomuistutus on PÄÄLLÄ, sinun on napautettava pumppua 2 kertaa vahvistaaksesi boluksen annostelun tai perusmuutoksen.

Jos et kaksoisnapauta pumppua 30 sekunnin kuluessa, toimitus tai muutos peruuntuu.

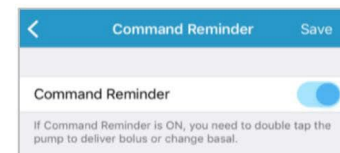

Omat asetukset

Perusins maksiminopeus _____ U/H

Perusinsuliinimallin nimi: _____

Aloitusaika	Nopeus (U/H)	Aloitusaika	Nopeus (U/H)
:			
:			

Perusinsuliinimallin nimi: _____

Aloitusaika	Nopeus (U/H)	Aloitusaika	Nopeus (U/H)

Nimi	Annosnopeus, Rate	Kesto
Raskas harjoitus	_____ % tai _____ U/H	
Keskipitkä harjoitus	_____ % tai _____ U/H	
Kevyt Harjoitus	_____ % tai _____ U/H	
Sairas	_____ % tai _____ U/H	
Väliaikainen 1	_____ % tai _____ U/H	
Väliaikainen 2	_____ % tai _____ U/H	
Väliaikainen 3	_____ % tai _____ U/H	

Omat asetukset

IH-suhde	
Aloitusaika	I:H (g hiilihydraattia)
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g
,	1 U : _____ g

Insuliiniherkkyys	
Aloitusaika	ISF (mmol/l)
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l
,	1 U : _____ mmol/l

VS-tavoite (mmol/l)		
Aloitusaika	Alaraja	Yläraja
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		

Enimmäisbolus: _____ U

Aktiivisen insuliinin aika: _____ : _____.



Medtrum Technologies Inc.
7F, Building 8, No. 200, Niudun Road Shanghai
201203, Kiina Puh: +86 -21
-50274781
Faksi: +86 -21 -50274779



Medtrum BV
Nijverheidsweg 17
5683 CJ paras
Alankomaat
Puh: +31 (0) 499745037

CE 0197

Tämä tuote on direktiivin 93/42/ETY (MDD)
ja direktiivin 2014/53/EU (RED) mukainen.

IM889017WW -006
3484649
Versio: 1.01

Simplifying Diabetes

Medtrum



ElcosMedical Oy

Taivaltie 5,
FI-01610 Vantaa