

Tasapainon säilyttäminen jalkinetta käyttäen

Joissakin kengissä on paksumpi pohja, mikä johtaa epätasapainoon toisen jalan osalta. Tämä voi johtaa polvi-, lonkka- tai selkäkipuun. EVENup on helposti kenkään kiinnitettävä pohja, joka voi ehkäistä ja helpottaa kipua.

	S	M	L
EUR	34 – 38	39 – 43	44 – 46
UK	3.5 – 7	7.5 – 9.5	10 – 14
Tuotenumero	AUSG-01-3-S	AUSG-01-3-M	AUSG-01-3-L

EVENup[®] by OPEd



Tilaa:
info@elcosmedical.com
(24/7) tai soita
09 70026630
(ma,ti & to 8-16)

Ota yhteyttä klinikkaan:



Ole hyvä
skannaa ja
näe youtube
-video miten
puetaan
jalkaan



<https://www.youtube.com/watch?v=d8CV6RQWHbQ>

OPEd
DISTRIBUTOR

ELCOS MEDICAL OY
Taivaltie 5
01610 Vantaa
Finland
Phone: +358 9-70026630
info@elcosmedical.com
www.elcosmedical.com

02/2022 | Häuser KG | attraction

VACO[®] by OPEd
pedes
DIABETIC

**Miksi on tärkeää
pitää tätä jalkinetta?**

Potilasesite



OPEd

Potilasinformaatio

VACOpedes Diabeticisi on moderni jalkine, joka suojaa ihoasi ja kudoksiasi vahingoittumiselta. Jalkineen käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää haavasi paranemiselle.

Tämän avulla saat parhaan ja suositelluimman(1) hoidon, joka tarjoaa sinulle samalla korkean mukavuustason.

Voit pestä vuoren 60 asteessa. Setissä on mukana vaihtovuori, jota voit pitää kun toinen on pesussa. Yksi ulkopohja on sisäkäyttöön ja toinen ulkokäyttöä varten.

Poista jalkine vain suositeltaessa

On erittäin tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita. VACOpedes Diabeticin käyttäminen ohjeiden mukaisesti lisää haavasi paranemisen mahdollisuuksia sekä paranemisnopeutta.

Mitä siitä seuraa jos jalkinetta ei pidetä?

On erittäin tärkeää käyttää VACOpedes Diabeticia ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen heikentää haavan paranemista.

Tämä voi johtaa haavainfektioon ja lopulta eskaloitua alaraajasi amputointiin.²

VACOpedes Diabeticin suositeltu käyttäminen johtaa...

- **Lisää huomattavasti haavan paranemismahdollisuuksiasi (8 haavaa 10:stä paranee 3:ssa kuukaudessa)³**
- **Vähentää haavasi infektioriskiä ja siksi amputaatoriskiä**
- **Parantaa liikkuvuuttasi**
- **Parantaa elämänlaatuasi**

98 potilasta 100:sta pitää sitä hyvin mukavana ja he ovat hyvin tyytyväisiä hoitoon.³

1 IWGDF Offloading Guidelines 2019 <https://iwgdfguidelines.org/offloading-guideline/>
2 Wu S, Driver VR, Wrobel JS et al (2007) Foot ulcers in the diabetic patient, prevention and treatment. Vasc Health Risk Manag 3(1): 65-76.
3 Evaluating a removable knee high cast walker within the diabetic foot pathway G. Bowen. P. Spruce 2019 Diabetic Foot Journal 22(3): 52-9