







Näin käytät

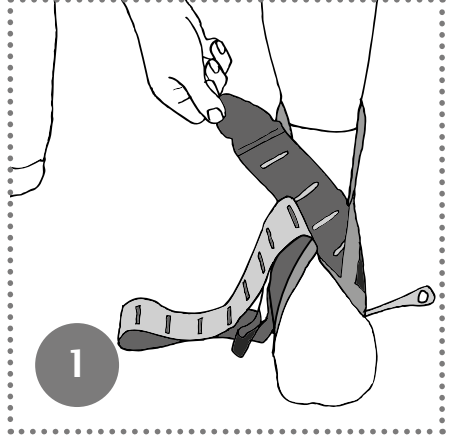


Käytä aina VACOTALUSTA sukan päällä. Kiinnitä ensin lyhyt ylempi diagonaalinen hihna vinottain. (Kuva 1)

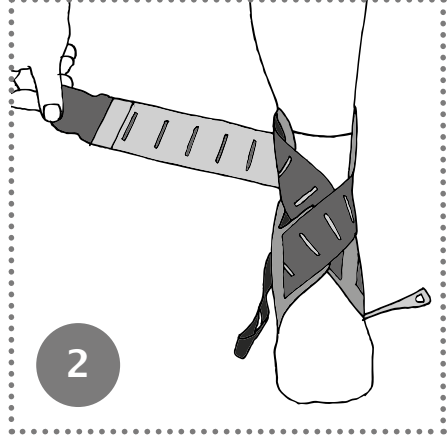


Seuraavaksi vedä elastinen hihna jalan sisäsvultta vinosti jalkapöydän yli, takaa jalan ympäri ja kiinnitä. (Kuvat 2 + 3)

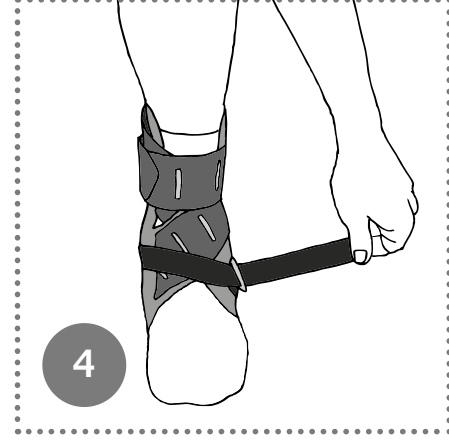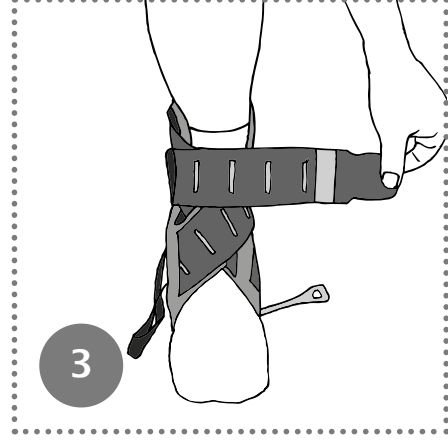

Kiinnitä Talushihna. (Kuvat 4 + 5).

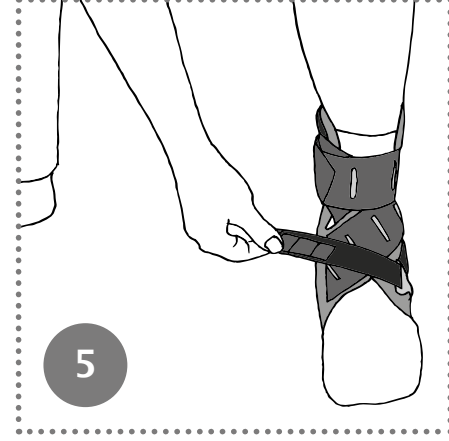

Näin Talushihna toimii

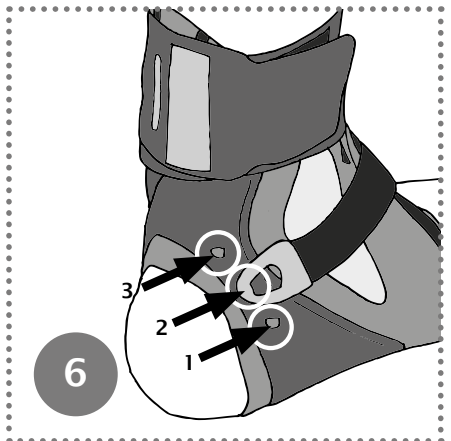

Telaluun liikkeen rajoitus; Talushihna voidaan kiinnittää ortoosin sisäsvultaan kolmeen eri kohtaan tai voidaan poistaa kokonaan.

Kohta 1: maksimi vakaus

Kohta 2: korkea vakaus



Kohta 3: normaali vakaus (Kuva 6)



Talushihna voidaan poistaa jos tarvitaan ainoastaan matalaa vakaustasoa. (Kuva 7)


Tarvittaessa Talushihnaa voi lyhentää saksilla.

Talushihnan kiinnityskohdan muuttaminen

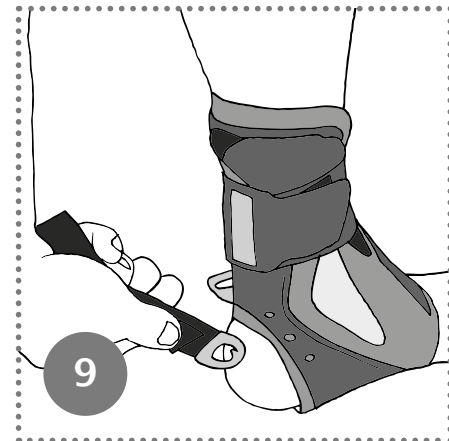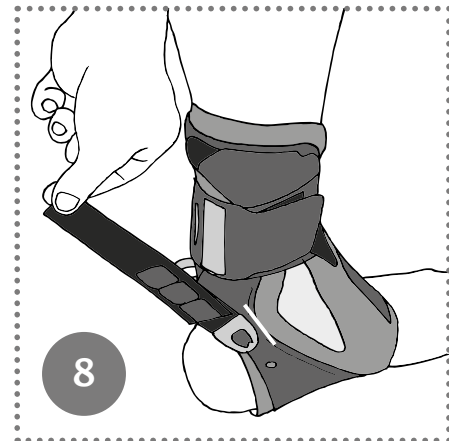

Avaa Talushihna kokonaan. Käännä Talushihnaa 90° ylös. Hihnan pitäisi nyt olla linjassa kolmen kiinnitysaukon kanssa. Nyt pystyt kiinnittämään Talushihnan. (Kuva 8)

Nosta Talushihnaa ja irrota se ortoosista. (Kuva 9)

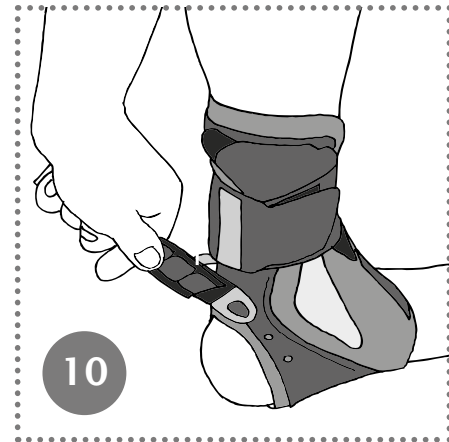

Kiinnitä Talushihna haluttuun kohtaan ja käännä eteenpäin 90° lukitaksesi hihnan ortoosiin. (Kuva 10)

Sulje Talushihna. (Kuva 11)

Kokotaulukko

Koko	Small	Standard
EUR	≤ 40	≥ 40
UK	≤ 6,5	≥ 6,5
US (M)	≤ 7,5	≥ 7,5
US (W)	≤ 8,5	≥ 8,5



OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlandern
Germany
Fon +49(0)8024/60818-210
Fax +49(0)8024/60818-299
mail@oped.de
www.oped.de

OPED AG
Hinterbergstrasse 26
6312 Steinhausen
Switzerland
Fon +41(0)41/748 53 35
contact@oped.ch
www.oped.ch

OPED UK Ltd
Unit 5
Avro Business Centre
Avro Way
Bowerhill
Melksham
SN12 6TP
United Kingdom
Phone +44(0)1380 722177
Fax +44(0)1380 710095
enquiries@oped.biz
www.oped-uk.com

OPED Australia Pty Ltd
2/97 Montague St.
North Wollongong NSW 2500
Australia
Phone +61(0)2 4226 5880
Fax +61(0)2 4226 5881
customerservice@oped.com.au
www.oped.com.au

OPED Asia-Pacific Co., Ltd.
5th Floor, No 16, Lane 148
Lide Street, Zhonghe Dist.
New Taipei City 23512
Taiwan
Phone +886 2 222 65586
Fax +886 2 222 65544
contact@oped-asia.com
www.oped.taipei

Elcos Medical Oy
Taivaltie 5
01610 Vantaa
Puh 09-700 26630
info@elcosmedical.com



Keeps you going.